

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : FWYSLYHJSX1TQ05XV0



Πτυσσόμενο Αμαξίδιο Αλουμινίου 18" 100kg

# ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις για το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;  
Επισκεφθείτε:

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών.  
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου.  
Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες.  
Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις μπορεί να πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτοκινούμενα Αναπηρικά Αμαξίδια

---

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Μην οδηγείτε το αναπηρικό αμαξίδιο σε κατηφόρες ή κλίσεις με ταχύτητα άνω των 8 km/h.
2. Μην χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο σε ανώμαλους ή πολύ τραχείς δρόμους.
3. Τα φρένα/κλειδώματα χρησιμοποιούνται μόνο για στάθμευση του αμαξιδίου.
4. Μην χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο για να σταματήσετε το αμαξίδιο ενώ κινείται.

**Step 1:**



**Step 2:**



5.

**Step 3:**



Same operation on the other side.

## Brake introduction

**1. Hold the brake.**



**2. Release brake.**



# ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

## Βήμα 1

Ανοίξτε προσεκτικά το πλαίσιο του αμαξιδίου.

## Βήμα 2

Ανασηκώστε και ασφαλίστε το επάνω μέρος ώστε να σταθεροποιηθεί το κάθισμα.

## Βήμα 3

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά.

**Step 1:**  
Pull the pull rod out.



**Step 2:**  
Bind the straps tightly





**Step 3:**  
Bring the pull bar back.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΕΝΟΥ

### 1. Ενεργοποίηση φρένου

Πιέστε και κρατήστε τη λαβή του φρένου.

### 2. Απελευθέρωση φρένου

Αφήστε τη λαβή ώστε να απενεργοποιηθεί το φρένο.

---

# ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η διαδικασία διπλώματος είναι αντίστροφη από το άνοιγμα.

Μετά το δίπλωμα, ασφαλίστε καλά τους ιμάντες.

## Βήμα 1

Τραβήξτε προς τα έξω τη ράβδο έλξης.

## Βήμα 2

Δέστε καλά τους ιμάντες συγκράτησης.

## Βήμα 3

Επαναφέρετε τη ράβδο έλξης στη θέση της.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μην χαράζετε ή γρατζουνίζετε την επιφάνεια του προϊόντος ώστε να αποφευχθεί φθορά του υλικού.
- Για καθημερινό καθαρισμό χρησιμοποιείτε ουδέτερο συνθετικό απορρυπαντικό.  
Καθαρίστε με νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε με στεγνό πανί.
- Μην έρχεστε σε επαφή με ισχυρά οξέα ή αλκάλια για αποφυγή διάβρωσης.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα συσκευασμένα αμαξίδια πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $40^{\circ}\text{C}$  και σχετική υγρασία έως 80%.

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει:

- να είναι καθαρός,
- να αερίζεται καλά,
- να μην περιέχει διαβρωτικά αέρια.

Κατά τη μεταφορά, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από:

- υγρασία,

- έντονο φως,
- πηγές θερμότητας.

---

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευαστής:  
Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Διεύθυνση:  
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,  
Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα

---

### Εισαγωγή στην Αυστραλία

SIHAO PTY LTD.  
1 ROKEVA STREET  
EASTWOOD NSW 2122  
Australia

---

### Εισαγωγή στις ΗΠΑ

Sanven Technology Ltd.  
Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

---

### Εκπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου

YH CONSULTING LIMITED  
Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX

---

### Εκπρόσωπος ΕΕ

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr. 69,  
60329 Frankfurt am Main

