

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SYSTCECKFLS4VNN2DV2



Κινητό Ιατρικό Καρότσι 5 Επιπέδων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
2. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ANSI και βαριά γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Κρατήστε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατήστε τους παρειαυσιζόμενους μακριά από την περιοχή συναρμολόγησης.
5. Μην εκτελείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο για σωστά και πλήρως συναρμολογημένα προϊόντα.
7. Συναρμολογήστε το προϊόν σε επίπεδη, σκληρή και λεία επιφάνεια ικανή να υποστηρίξει με ασφάλεια το φορτίο.
8. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο διάγραμμα συναρμολόγησης αυτού του εγχειριδίου. Ξεπακετάρετε και οργανώστε όλα τα εξαρτήματα σε καθαρό χώρο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:

1. Αυτό το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά ή πάνω σε αυτό.
2. Μην υπερβαίνετε τα όρια βάρους πριν από τη μετακίνηση.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο σε επίπεδη, σκληρή και λεία επιφάνεια ικανή να υποστηρίξει με ασφάλεια το φορτίο.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τον προορισμό του.
5. Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε εάν τα εξαρτήματα είναι χαλαρά ή φθαρμένα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	KET750A
Τάση (Rating)	110VAC-120VAC, 60Hz / 220VAC-240VAC, 50Hz
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΠxΥ mm)	(900-1160)590(1510-1700)
Μέγεθος Συσκευασίας (ΜxΠxΥ mm)	780510970
Καθαρό Βάρος (kg)	39
Μικτό Βάρος (kg)	Περίπου 43,2

Η συσκευασία, οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

STEP1



STEP2



STEP3



STEP4



STEP5

