

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EHYZXQCKJLQ8WW1ZSV0



Περιπατητήρας & Καροτσάκι 2 σε 1

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόλογος

Πρώτα απ' όλα, εκφράζουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς τους πελάτες που αγόρασαν τον εξοπλισμό μας. Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ευχόμαστε τα προϊόντα της εταιρείας μας να σας προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία.

Προσοχή

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο χρήσης. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προκύψει από κακή χρήση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο υλικό αυτό, ούτε για τυχαίες ή συνεπακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από την παροχή, πραγματική απόδοση ή χρήση του προϊόντος.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές πληροφορίες προστατευμένες από νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, ανατύπωση ή μετάφραση χωρίς έγγραφη άδεια.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Ευθύνη του κατασκευαστή

Η εταιρεία φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και αξιοπιστία της λειτουργίας του εξοπλισμού **μόνο εφόσον**:

- η συναρμολόγηση, επισκευή και συντήρηση εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
- η ηλεκτρική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους κανονισμούς,
- και ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Εγγύηση

Η εταιρεία εγγυάται ότι ο εξοπλισμός (εκτός από τα αναλώσιμα μέρη) είναι σε καλή και κανονική κατάσταση, χωρίς ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, για **ένα έτος** από την ημερομηνία αποστολής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Προειδοποίηση – Κατά τη χρήση:

1. Αν ο εξοπλισμός φαίνεται χαλαρός, παρουσιάσει πτώση ή ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία.
2. Κρατάτε τον χώρο καθαρό και τακτοποιημένο. Η ακαταστασία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
3. Μην αποσπάτε την προσοχή σας κατά τη χρήση. Μπορεί να χάσετε τον έλεγχο.
4. Κατά τη χρήση από παιδιά, πρέπει να υπάρχει συνοδεία ενήλικα.
5. Χρησιμοποιείτε λογικά, ανάλογα με την κατάσταση. Μην υπερβαίνετε τα όρια.
6. **Πριν από τη χρήση**, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη, ότι το φρένο λειτουργεί κανονικά και ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Καθαρισμός

- Το προϊόν πρέπει να πλένεται με νερό και να στεγνώνει καλά.
- Αν η επιφάνεια έχει γρατζουνιές, εφαρμόστε αντискωριακό λάδι για καλύτερη προστασία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πίσω τροχός του προϊόντος είναι κλειδωμένος ώστε να μην γλιστράει σε επικλινές έδαφος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός αναδίπλωσης της βάσης του καθίσματος έχει ασφαλίσει κατά τη χρήση.



ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- **Όνομα προϊόντος:** Rollator (Περιπατητήρας με ρόδες)
- **Μοντέλο:** FB-L42713
- **Χρώμα:** Μπλε / Μαύρο / Κόκκινο
- **Μέγεθος τροχών:** Μπροστά 8 ίντσες / Πίσω 10 ίντσες
- **Μέγιστη αντοχή βάρους:** 300 lbs (περίπου 136 κιλά)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



1. Όπως φαίνεται στο σχήμα:
Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό στο κυρίως πλαίσιο, ευθυγραμμίστε τον με την τρύπα και ασφαλίστε τον με βίδες και κουμπώματα.



2. Όπως φαίνεται στο σχήμα:
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τον άλλο μπροστινό τροχό.



3. Όπως φαίνεται στο σχήμα:

Τοποθετήστε τον πίσω τροχό στον σωλήνα του βασικού πλαισίου, ευθυγραμμίστε τον με την τρύπα και σπρώξτε προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει η μπίλια (κουμπί ασφάλισης).



4. Όπως φαίνεται στο σχήμα:

Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό και από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται παραπάνω.



5. Όπως φαίνεται στο σχήμα:

Ανοίξτε το κυρίως πλαίσιο και πιέστε με τα χέρια τις δύο πλευρές της βάσης του καθίσματος ώστε το άγκιστρο να πιάσει την κυκλική ασφάλεια. Για να διπλώσετε ξανά, τραβήξτε τον ιμάντα της βάσης του καθίσματος προς τα πάνω με το χέρι.



6. Όπως φαίνεται στο σχήμα:

Τοποθετήστε τους σωλήνες των μπράτσων (αριστερό και δεξί) μέσα στο

σωλήνα του κυρίως πλαισίου μέχρι να ασφαλίσει η μπίλια (κουμπί ασφαλίσης).



7. Όπως φαίνεται στο σχήμα:
Τοποθετήστε το δεξί υποπόδιο (foot pedal) στον πείρο στη δεξιά πλευρά του κυρίως πλαισίου και περιστρέψτε το προς τα αριστερά για να στερεωθεί.



8. Όπως φαίνεται στο σχήμα:
Τοποθετήστε το αριστερό υποπόδιο στον πείρο στη δεξιά πλευρά του κυρίως πλαισίου και περιστρέψτε το προς τα δεξιά για να στερεωθεί.



9. Όπως φαίνεται στο σχήμα:



Τοποθετήστε τη θήκη για τις πατερίτσες (crutch holder) στη βάση στήριξης.

10. Απόδοση ολοκληρωμένης συναρμολόγησης.



Σχετικά με το προϊόν

1. Σταθερό & Δύσκολο να Ανατραπεί:

Διαθέτει μπροστινούς τροχούς 8" και εμπρόσθιους περιστρεφόμενους 360° για εύκολη κίνηση. Αρκετά ανθεκτικό για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, προσφέροντας ομαλή κύλιση.

2. Ευκολία στη Μεταφορά:

Διαθέτει τσάντα μεταφοράς με φερμουάρ για να έχετε άμεσα τα απαραίτητα αντικείμενα δίπλα σας, αφήνοντας τα χέρια σας ελεύθερα για να απολαύσετε τη βόλτα σας.

3. Υψηροσία Ποιότητας:

Ελεγμένο 100% πριν φύγει από το εργοστάσιο και παροχή 24ωρης εξυπηρέτησης πελατών μέσω email.

4. Επιπλέον Λειτουργίες:

Το προϊόν διαθέτει σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος και μαξιλάρι καθίσματος. Όταν ο χρήστης χρειάζεται ξεκούραση, μπορεί να ενεργοποιήσει το φρένο και να καθίσει στο μαξιλάρι.

5. Χώρος Αποθήκευσης:

Υπάρχει φορητός αποθηκευτικός σάκος κάτω από το μαξιλάρι του καθίσματος, ιδανικός για προσωπικά αντικείμενα ή καθημερινές ανάγκες.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE