

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : FWYSLYLHJ15704N02V0



Πτυσσόμενο Αμαξίδιο Αλουμινίου  
15.75" 220lbs

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Μην οδηγείτε το αναπηρικό αμαξίδιο σε κατηφόρα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8 km/h.
2. Μην χρησιμοποιείτε το αναπηρικό αμαξίδιο σε ανώμαλες ή πολύ τραχιές επιφάνειες δρόμου.
3. Τα φρένα/κλειδώματα χρησιμοποιούνται μόνο για τη στάθμευση του αμαξιδίου όταν είναι ακίνητο.
4. Μην χρησιμοποιείτε το χειροκίνητο φρένο για να σταματήσετε το αμαξίδιο ενώ βρίσκεται σε κίνηση.

---

## Άνοιγμα Αναπηρικού Αμαξιδίου

### Step 1:



### Step 2:



### Step 3:



Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και από την άλλη πλευρά.

### Step 4:



## Εισαγωγή Φρένου

1. Κρατήστε τη λαβή του φρένου.



Απελευθερώστε το φρένο.



## Αναδίπλωση Προϊόντος

Η διαδικασία αυτή είναι αντίστροφη από τη διαδικασία ανοίγματος.

Μετά την αναδίπλωση, δέστε καλά τους μάντες στερέωσης.

**Βήμα 1:**

Τραβήξτε προς τα έξω τη ράβδο έλξης.



### **Βήμα 2:**

Δέστε καλά τους μάντες στερέωσης.



### **Βήμα 3:**

Επαναφέρετε τη μπάρα έλξης στη θέση της.



## Συντήρηση Προϊόντος

1. Μην χτυπάτε ή γρατζουνάτε την επιφάνεια του προϊόντος ώστε να αποφεύγεται η φθορά του υλικού.
2. Για καθημερινό καθαρισμό και συντήρηση, χρησιμοποιείτε ουδέτερο συνθετικό απορρυπαντικό. Σκουπίστε με νωπό πανί και στη συνέχεια με στεγνό πανί.
3. Αποφύγετε την επαφή με ισχυρά οξέα ή αλκαλικά υλικά ώστε να προληφθεί η διάβρωση.

---

## Αποθήκευση Προϊόντος

Οι συσκευασμένες καρέκλες πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία από  $-10^{\circ}\text{C}$  έως  $40^{\circ}\text{C}$  και σε σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 80%.

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι καθαρός, καλά αεριζόμενος και χωρίς διαβρωτικά αέρια.

Κατά τη μεταφορά, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από υγρασία, φως και πηγές θερμότητας.

---

### Κατασκευαστής:

Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

### Διεύθυνση:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,  
Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα

### Εισαγωγή στην Αυστραλία από:

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET  
EASTWOOD NSW 2122, Australia

**Εισαγωγή στις ΗΠΑ από:**

Sanven Technology Ltd.  
Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

**Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP)**

YH CONSULTING LIMITED  
C/O YH Consulting Limited  
Office 147, Centurion House,  
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

---

**Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ε.Ε. (EC REP)**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr. 69,  
60329 Frankfurt am Main, Germany

