


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZDKMJPD24YC1YF5QCV0

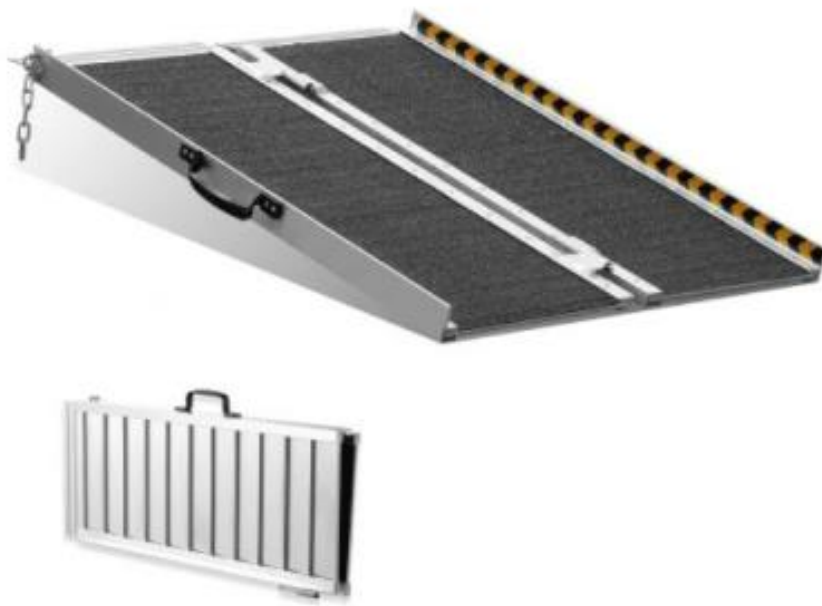

Φορητή Ράμπα Αμαξιδίου

1. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διαδικασίες πριν από την εγκατάσταση και χρήση της ράμπας. Πριν τη συναρμολόγηση και χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις και ετικέτες.
-  Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού: διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
-  Να φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως για τη μετακίνηση αναπηρικών αμαξιδίων, καροτσιών και άλλων βοηθημάτων σε εμπόδια.

(1) ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ

- ΜΗΝ υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ή το ύψος της ράμπας.
- Χρησιμοποιείτε τη ράμπα μόνο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά του χρήστη του αμαξιδίου μόνος του πάνω στη ράμπα.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τη ράμπα με εξειδικευμένο βοηθό και να φοράτε ζώνη ασφαλείας.
- Όταν μεταφέρετε βαριά αντικείμενα, να βεβαιώνετε ότι υπάρχει άτομο για βοήθεια, ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε ανθρώπους ή πράγματα.


(2) Οδηγίες πριν τη χρήση

3. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του εξοπλισμού κινητικότητας που χρησιμοποιείτε για οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης σε κλίσεις ή κατευθύνσεις. Μην υπερβαίνετε τις συστάσεις.
 4. Μην χρησιμοποιείτε τη ράμπα αν είναι κατεστραμμένη ή ασταθής.
 5. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της ράμπας.
 6. Χρησιμοποιείτε προσοχή κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της ράμπας ώστε να αποφεύγετε σημεία που μπορεί να πιαστεί το χέρι.
 7. Χρησιμοποιήστε τη ράμπα μόνο εάν οι προσγειώσεις (landings) είναι επίπεδες και μπορούν να στηρίξουν το ίδιο βάρος με τη ράμπα (800 lbs).
 8. Η ράμπα μπορεί να είναι ολισθηρή σε βρεγμένες συνθήκες· χρησιμοποιείτε με προσοχή.
 9. Μην χρησιμοποιείτε τη ράμπα αν είναι καλυμμένη με πάγο, χιόνι, φύλλα ή άλλα εμπόδια. Καθαρίζετε την επιφάνεια πριν από τη χρήση.
 10. Ακατάλληλη χρήση της ράμπας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
 11. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση, εγκατάσταση ή χρήση της ράμπας.
 12. Μη σωστή τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου, ανατροπή ή ζημιά.
 13. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν. Μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
-

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. Πριν τη χρήση

1. Χρησιμοποιείτε τη ράμπα μόνο εάν υπάρχει αρκετός χώρος ελιγμών και στις δύο άκρες της, για να διασφαλίζεται η ασφαλής είσοδος και έξοδος.
2. Ανοίξτε πλήρως τη ράμπα, βεβαιωθείτε ότι τα κλειδώματα έχουν ασφαλίσει και ότι η ράμπα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.

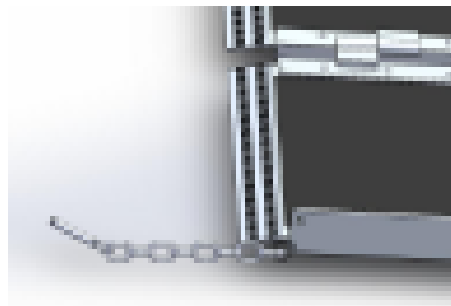

3. Συνδετική πλακέτα (Connecting board)

Τοποθετήστε το προϊόν σταθερά στα σκαλοπάτια και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερό πριν από τη χρήση.

4. Έλεγχος πριν τη χρήση

Ελέγξτε τη ράμπα για φθαρμένα, χαλαρά ή κατεστραμμένα μέρη. Εάν βρείτε οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις, **μην τη χρησιμοποιήσετε**.

3. Πώς να Χρησιμοποιήσετε (How to USE)

Βήμα 1: Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία.

Βήμα 2: Αφαιρέστε το κλείδωμα από την οπή ασφάλισης και ξεκλειδώστε το προϊόν.

Βήμα 3: Ξεδιπλώστε το προϊόν.


(Τύπος Α)

1. Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε το κλείδωμα από την οπή ασφάλισης και ξεκλειδώστε το προϊόν.
3. Ξεδιπλώστε το προϊόν.

(Η εικόνα δείχνει τα τρία βήματα: unpack → ξεκλείδωμα → ξεδίπλωμα.)

(Τύπος Β)

1. Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε το κλείδωμα από την οπή ασφάλισης και ξεκλειδώστε το προϊόν.
3. Ξεδιπλώστε το προϊόν.

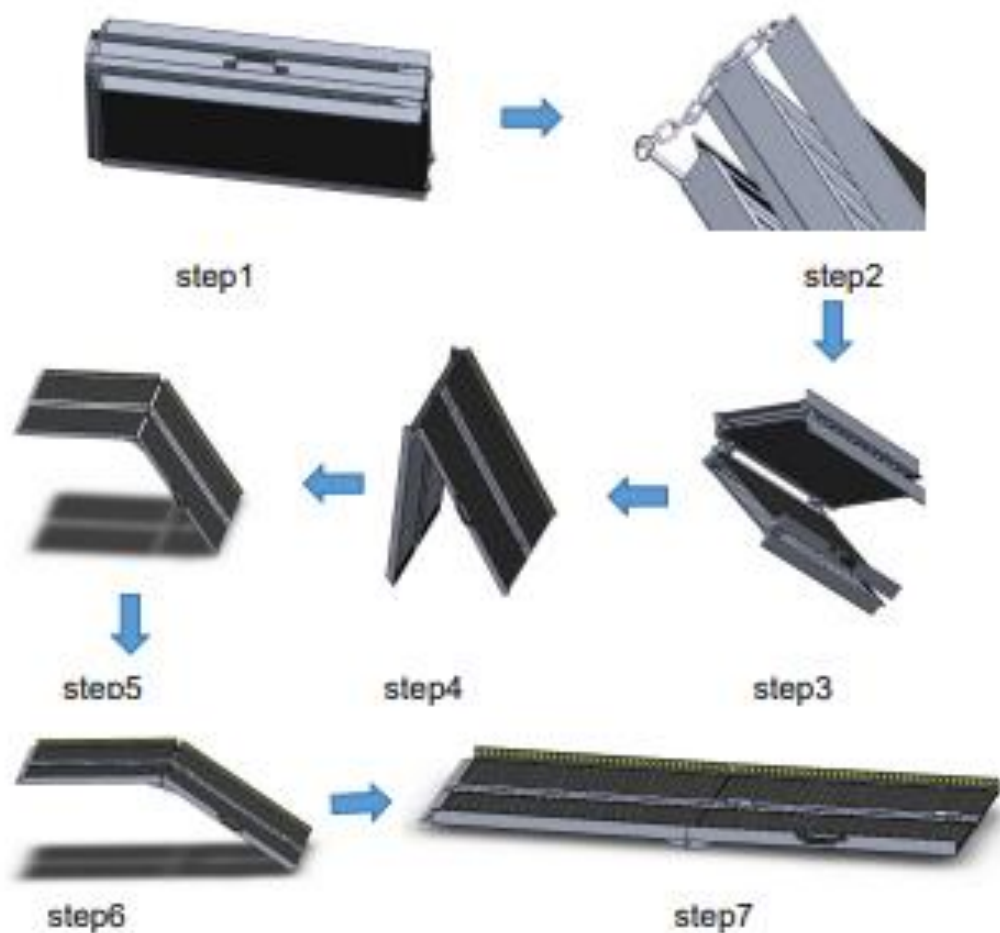


Βήμα 8

Τοποθετήστε το προϊόν σταθερά στο σκαλοπάτι.

Επιλέξτε ράμπα κατάλληλου μήκους με βάση το προτεινόμενο ύψος.

Η αντοχή βάρους της ράμπας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **800 lbs (περίπου 360 kg)**.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να μετακινηθεί.

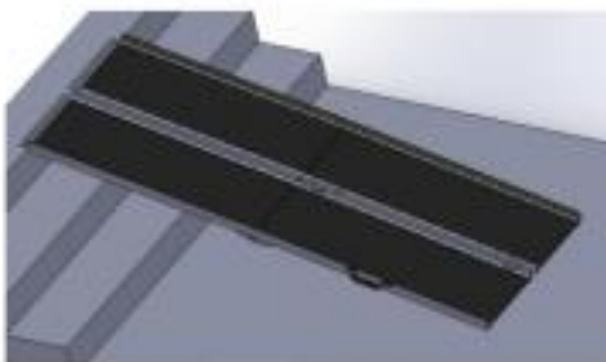


Σημειώσεις

1. Όταν το κλείδωμα δεν έχει αφαιρεθεί από την οπή ασφάλισης, **μην επιχειρήσετε** να ξεδιπλώσετε πλήρως το προϊόν.
2. Διπλώστε το προϊόν με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που το ανοίξατε.
3. Όταν χρησιμοποιείτε αναπηρικό αμαξίδιο με αυτήν τη ράμπα:
 - Μετακινείτε το αμαξίδιο αργά από χαμηλότερο σε υψηλότερο σημείο.
 - Όταν το κατεβάζετε από ψηλότερο σε χαμηλότερο σημείο, μπορεί να προκληθεί πτώση του χρήστη αν δεν γίνει σωστά.
 - Ένα απότομο σπρώξιμο ή απότομο φρενάρισμα μπορεί επίσης να προκαλέσει ατύχημα.
 - Να είστε πάντα προσεκτικοί και αργοί όταν σπρώχνετε το αμαξίδιο.



Right(✓)

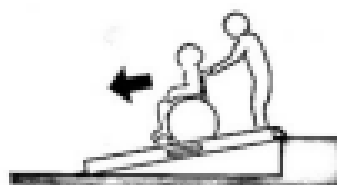

Wrong (X)

4. Παράμετροι Προϊόντος

Αρ.	Μοντέλο	Μήκος	Κατάλληλο ύψος από σκαλοπάτια στο έδαφος	Μέγιστο Βάρος	Υλικό	Σημείωση
1	1YF5QCV0	24 ίντσες	100–150 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE A
2	19UQ9FV0	36 ίντσες	150–200 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE A
3	1YAZTIV0	48 ίντσες	200–250 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE A
4	12YUIHV0	60 ίντσες	250–300 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE A
5	1JQ8CRV0	72 ίντσες	300–360 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE A
6	13E5LEV0	84 ίντσες	360–420 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE B
7	17M5TIV0	96 ίντσες	420–500 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE B
8	CUEI5QV0	120 ίντσες	500–600 mm	800 lbs	Κράμα Αλουμινίου	TYPE B

5. Οδηγός Συντήρησης

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή, ασφαλή και επίπεδη αρχική επιφάνεια.
Η ελάχιστη αντοχή βάρους της επιφάνειας στήριξης πρέπει να είναι ίση με αυτήν της ράμπας (800 lbs).
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα βάρους του προϊόντος.
2. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζει με ασφάλεια στην επιφάνεια εκκίνησης.
Εάν δεν υπάρχει σταθερή και ασφαλής επιφάνεια ή αν το προϊόν δεν εφαρμόζει σωστά, **μην χρησιμοποιήσετε** τη ράμπα.
3. Μην παραβιάζετε, επιχειρείτε επισκευή ή τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του προϊόντος.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγετε σημεία που μπορεί να πιαστεί το χέρι κατά τη συναρμολόγηση και χρήση.
4. Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλο εξοπλισμό κινητικότητας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εξοπλισμού για τις αποδεκτές οδηγίες, όπως κλίση, κατεύθυνση κίνησης κ.λπ.
Μην υπερβαίνετε τις προδιαγραφές του εξοπλισμού.
5. Όταν χρησιμοποιείτε τη ράμπα, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει με ασφάλεια στην επιφάνεια εκκίνησης για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια.
6. Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε την επιφάνεια της ράμπας από πάγο, χιόνι, σκόνη, φύλλα ή άλλα υπολείμματα.
 - ο Για σκόνη και βρωμιά, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και καθαριστικό χωρίς αλκάλια.
 - ο Σκουπίστε καλά την επιφάνεια πριν τη χρήση.
7. Η επιφάνεια της ράμπας μπορεί να γίνει ολισθηρή σε βρεγμένες συνθήκες. Περπατήστε με προσοχή και δώστε προσοχή στη σταθερότητα των ποδιών σας.
8. Αν η ράμπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε την σε ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
9. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή άλλα πτητικά οργανικά υγρά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
10. Μην τρίβετε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα ή σφουγγάρι.