

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CSDJLDXDJZGZUND9MV0



Λειτουργία με ασφάλεια

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε σημείο όπου μπορείτε να το συμβουλευέστε εύκολα.

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον ασφαλή και σωστό τρόπο χρήσης της συσκευής, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και υλικές ζημιές σε εσάς ή σε τρίτους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ή οποιοδήποτε προαιρετικό εξάρτημα χωρίς να έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις παρούσες οδηγίες.
2. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
3. Κρατάτε πάντα παιδιά και κατοικίδια μακριά από τη μπάρα υποστήριξης.
4. Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
5. Μην επιχειρείτε πρόχειρες επισκευές ή μετατροπές.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο.
7. Μην αφήνετε ποτέ τον ασθενή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
8. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
9. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι στεγνό και χωρίς εμπόδια, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα ή πτώσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη: 113 kg (250 lb).** Μην χρησιμοποιείτε τη μπάρα για άτομα που υπερβαίνουν το όριο αυτό.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η χρήση πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα ή φροντιστές που έχουν εκπαιδευτεί στη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.
- Η μπάρα ανύψωσης κρεβατιού προορίζεται αποκλειστικά για να βοηθά τον χρήστη να αναστηκάνεται ή να κάθεται στο κρεβάτι.
- **Δεν προορίζεται για μεταφορά ασθενών** από ένα σημείο σε άλλο.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για πιθανές ζημιές από τη μεταφορά. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τη VEVOR.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι καλά σφιγμένα πριν από τη χρήση.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τα στοιχεία στερέωσης, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα σημεία στήριξης.
- Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Εάν η συσκευή παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένη στον ήλιο, οι μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε την με προσοχή.

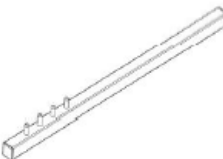
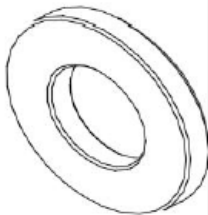
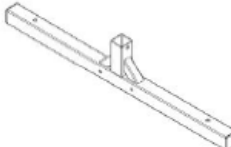
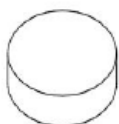
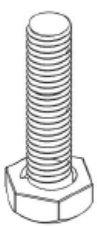
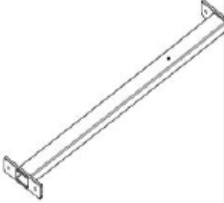
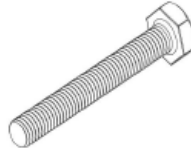
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως κάθισμα για παρατεταμένη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά και μην τοποθετείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.
- Η τακτική συντήρηση της μπάρας και των εξαρτημάτων της είναι απαραίτητη για την ασφαλή και σωστή λειτουργία.

Εάν παραχωρήσετε το προϊόν σε άλλο χρήστη, παραδώστε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.


Λίστα Εξαρτημάτων

Σημείωση: Κάθε στοιχείο στερέωσης συνοδεύεται από ένα επιπλέον ανταλλακτικό για περίπτωση ανάγκης.

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
01	Οριζόντιος σωλήνας	1
02	Χειρόβιδα (M8 × 25 mm)	2
03	Πάνω κάθετος σωλήνας	1
04	Αστεροειδής χειρόβιδα (M8 × 8 mm)	5
05	Σύνδεσμος κάθετου σωλήνα	1
06	Λοξό στήριγμα βάσης	1
07	Ροδέλα	5
08	Εμπρόσθιος σωλήνας βάσης	1
09	Λαστιχένιο πέλμα	5
10	Εξαγωνική βίδα (M8 × 32 mm)	1
11	Κεντρικός σωλήνας βάσης	1
12	Εξαγωνική βίδα (M8 × 60 mm)	5
13	Πίσω εγκάρσιος σωλήνας βάσης	1
14	Εξαγωνικό παξιμάδι (M8)	5
15	Λαβή ανύψωσης (χειρολαβή)	1
16	Εξαγωνική βίδα (M8 × 48 mm)	1
17	Κλειδί	2
18	Ιμάντας ανάρτησης λαβής	1
19	Πείρος ασφάλισης	5

01.  1PCS	02. M8*25mm  2PCS	03.  1PCS	04. M8*8mm  5PCS
05.  1PCS	06.  1PCS	07.  5PCS	08.  1PCS
09.  5PCS	10. M8*32mm  1PCS	11.  1PCS	12. M8*60mm  5PCS

13.  1PCS	14.  5PCS	15.  1PCS	16. M8*48mm  1PCS
17.  2PCS	18.  1PCS	19.  5PCS	

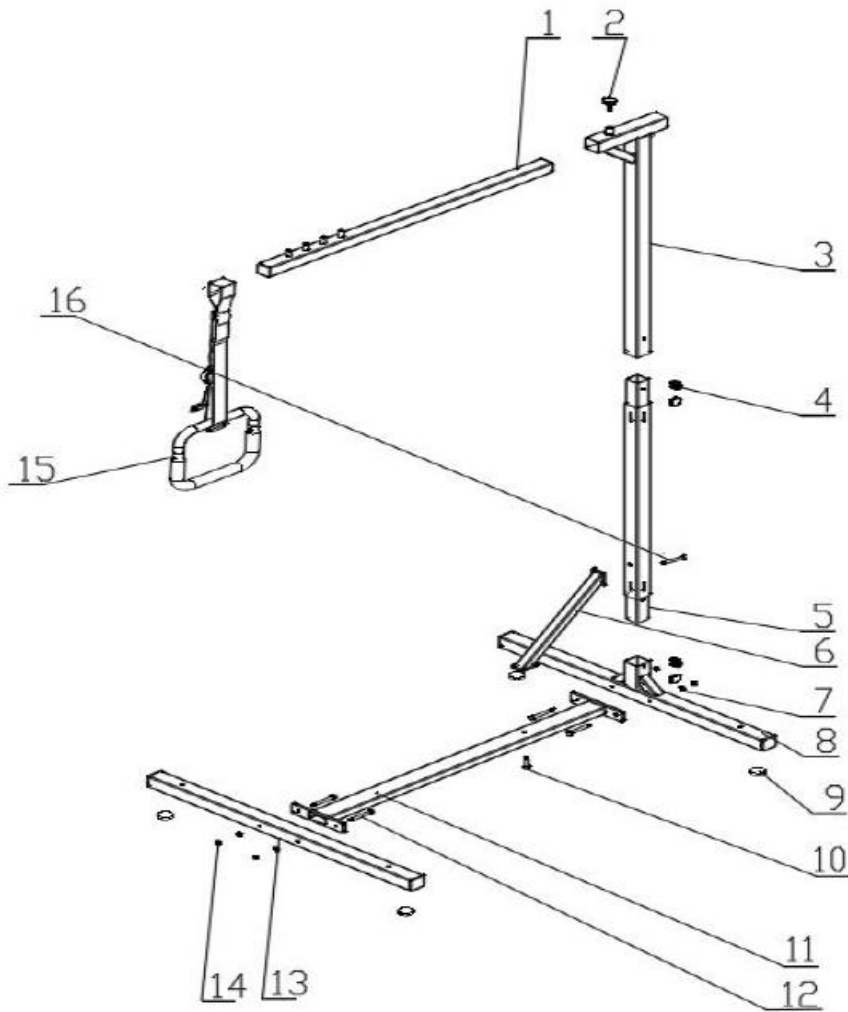

Σχεδιάγραμμα Έκρηξης (Exploded View)

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη θέση όλων των εξαρτημάτων πριν από τη συναρμολόγηση και βοηθά στην αναγνώριση της σωστής θέσης κάθε μέρους.

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 1

1. Συνδέστε τις δύο εξαγωνικές βίδες **M8×60 mm (12)** στη βάση με τον κεντρικό σωλήνα βάσης (**11**), περνώντας τις διαδοχικά από:
 - τον κεντρικό σωλήνα βάσης,
 - τον εμπρόσθιο σωλήνα βάσης (**08**),
 - τη ροδέλα (**07**).

2. Βιδώστε προσωρινά τα παξιμάδια **M8 (14)** χωρίς να τα σφίξετε πλήρως.

Σημείωση:

Για να αποφευχθεί η κακή ευθυγράμμιση των εξαρτημάτων, **μη χρησιμοποιήσετε ακόμη το κλειδί**. Σφίξτε μόνο με το χέρι σε αυτό το στάδιο.

3. Τοποθετήστε τον πίσω εγκάρσιο σωλήνα βάσης **(13)** με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
4. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα τέσσερα λαστιχένια πέλματα **(09)** και κολλήστε τα στις δύο πλευρές του εμπρόσθιου σωλήνα βάσης **(08)** και του πίσω εγκάρσιου σωλήνα **(13)**.

Συνιστάται να τοποθετηθούν περίπου **30 mm** από το εξωτερικό άκρο των σωλήνων.

Βήμα 2

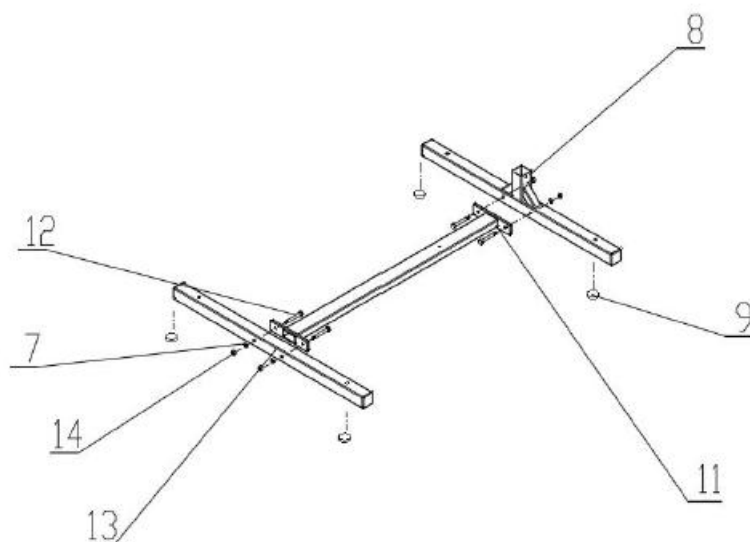
1. Ευθυγραμμίστε τον **σύνδεσμο του κάθετου σωλήνα (05)** με την αντίστοιχη οπή του **εμπρόσθιου σωλήνα βάσης (08)** και σφίξτε τον χρησιμοποιώντας την **αστεροειδή χειρόβιδα M8×8 mm (04)**.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές του **λοξού στηρίγματος βάσης (06)** με τις αντίστοιχες οπές του **συνδέσμου κάθετου σωλήνα (05)** και του **κεντρικού σωλήνα βάσης (11)**.
3. Στερεώστε το λοξό στήριγμα χρησιμοποιώντας την **εξαγωνική βίδα M8×32 mm (10)**.
4. Συνδέστε το λοξό στήριγμα **(06)** με τον σύνδεσμο του κάθετου σωλήνα **(05)** χρησιμοποιώντας την **εξαγωνική βίδα M8×48 mm (16)**.

Σημείωση:

Για να αποφευχθεί πιθανή κακή ευθυγράμμιση, μην χρησιμοποιήσετε ακόμη το κλειδί. Σφίξτε τις βίδες μόνο με το χέρι.


5. Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε το κλειδί και σφίξτε καλά όλα τα παξιμάδια και τις βίδες, ώστε η κατασκευή να

είναι απολύτως ασφαλής πριν από τη χρήση.




Βήμα 3

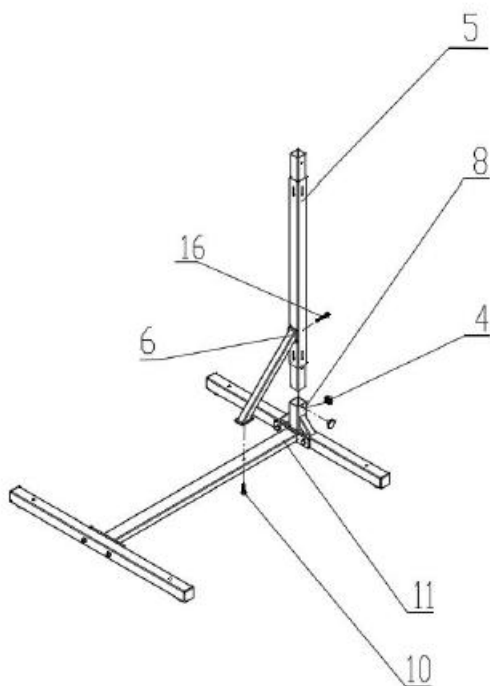
1. Τοποθετήστε τον **πάνω κάθετο σωλήνα (03)** μέσα στον **σύνδεσμο του κάθετου σωλήνα (05)**.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές.
3. Σφίξτε τον χρησιμοποιώντας την **αστεροειδή χειρόβιδα M8×8 mm (04)**.



Βήμα 4

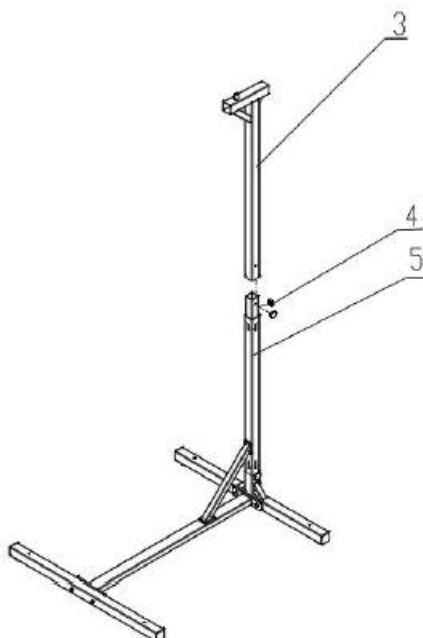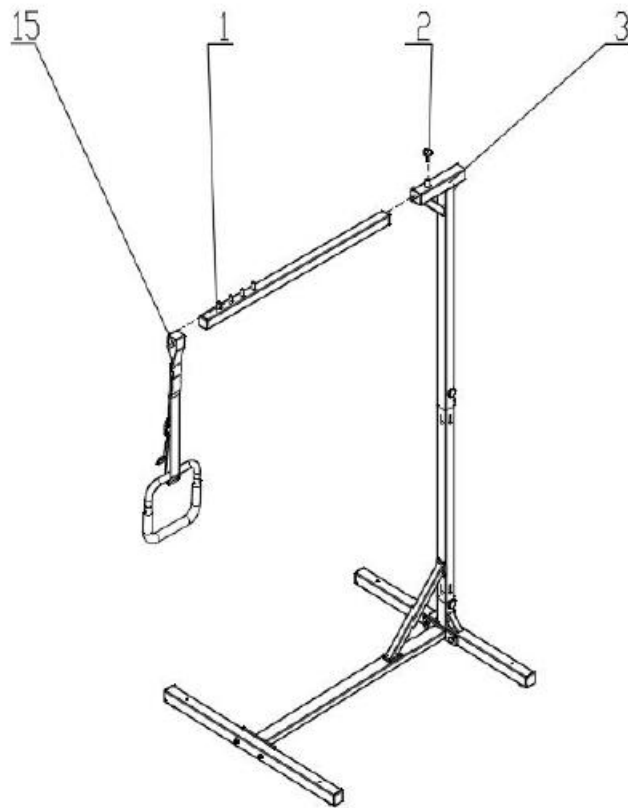1. Εισάγετε τον **οριζόντιο σωλήνα (01)** στο επάνω μέρος του **κάθετου σωλήνα (03)**.
2. Ρυθμίστε τον έτσι ώστε το πίσω άκρο του να βρίσκεται **πάνω ή ακριβώς στη γραμμή ορίου (limit line)**.
3. Βιδώστε και σφίξτε τη **χειρόβιδα M8×25 mm (02)** στην αντίστοιχη οπή του κάθετου σωλήνα.
4. Κρεμάστε τη **λαβή ανύψωσης (15)** στον οριζόντιο σωλήνα και ρυθμίστε τη στο ύψος που εξυπηρετεί καλύτερα τον χρήστη.





Ολοκλήρωση Συναρμολόγησης

Η συναρμολόγηση της μπάρας έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση:

- Ελέγξτε οπτικά ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι καλά σφιγμένα.
- Δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Συμβουλές Χρήσης

1. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, τοποθετήστε τον **πίσω εγκάρσιο σωλήνα της βάσης (13)** κάτω από το κρεβάτι και μετακινήστε ολόκληρη τη μπάρα έτσι ώστε η λαβή να βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι.
2. Ρυθμίστε τη **λαβή ανύψωσης (15)** στο ύψος που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
3. Ο **οριζόντιος σωλήνας (01)** μπορεί επίσης να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μεταξύ της γραμμής ορίου και του κάθετου σωλήνα,

χαλαρώνοντας τη χειρόβιδα **M8×25 mm (02)** και επανασφίγγοντάς την στη νέα θέση.

Οδηγίες Λειτουργίας

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των **113 kg (250 lb)**.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα εξαρτήματα είναι καλά σφιγμένα.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη μπάρα ανύψωσης.

Φροντίδα και Συντήρηση

Καθαρισμός

- Σκουπίζετε τον μεταλλικό σκελετό με ένα μαλακό και στεγνό πανί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
- Εάν η συσκευή βραχεί, στεγνώστε την αμέσως.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά κεριά, καυστικά χημικά ή σπρέι σιλικόνης.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή ή πλυστικό υψηλής πίεσης.

Συντήρηση

Για να διασφαλίζεται η ασφαλής και σωστή λειτουργία, πραγματοποιείτε τους παρακάτω ελέγχους **μία φορά τον μήνα**:

- Ελέγχετε όλες τις βίδες, τα παξιμάδια και τα στοιχεία στερέωσης για χαλάρωση ή φθορά.
- Αντικαθιστάτε άμεσα οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει φθορά ή ζημιά.
- Ελέγχετε όλα τα κύρια εξαρτήματα της κατασκευής για τυχόν παραμορφώσεις ή ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις παραμένουν σταθερές και ασφαλείς.

- Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να αντικατασταθούν τα προβληματικά εξαρτήματα.

Στοιχεία Κατασκευαστή

Κατασκευαστής:

Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Διεύθυνση:

2F-2, 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong 528414, Κίνα

Εισαγωγέας Αυστραλίας:

SIHAO PTY LTD.

1 Rokeva Street, Eastwood NSW 2122, Australia

Εισαγωγέας ΗΠΑ:

Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου (UK REP):

YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4AX

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC REP):

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main, Germany

